

Návod na údržbu odsávania s prípravkami Orotol® plus a MD 555 cleaner



Každodenná dezinfekcia odsávania pomocou Orotol® plus

1. Odsajte 2 litre vody na predbežné čistenie
2. Pripravte 2% roztok:
 - na 2 litre vody: 40 ml roztoku = 2 polievčka po rysku
3. Nasadte odsávacie hadice a odsajte roztok
4. Dezinfikujte pluvadla min. 250 ml roztoku
5. Nechajte pôsobiť min. 1 hodinu, ideálne do druhého dňa
6. Pri opätovnom uvedení do prevádzky odsajte 2 litre vody na opláchnutie súpravy

Čistenie odsávania pomocou MD 555 cleaner (min. 2x týždenne)

1. Odsajte 2 litre vody na predbežné čistenie
2. Pripravte 5% roztok:
 - na 2 litre vody: 100 ml roztoku = 5 polievčok po rysku
3. Nasadte odsávacie hadice a odsajte roztok
4. Nalejte min. 250 ml roztoku na dezinfekciu a čistenie pluvadla
5. Nechajte pôsobiť 30 – 120 min
6. Pri opätovnom uvedení do prevádzky odsajte 2 litre vody na opláchnutie súpravy

Prípravky Orotol® plus a MD 555 cleaner
používajte s odstupom minimálne 2 hodiny

Návod každodenná dezinfekcia Orotol® plus



Odsajte 2 litre vody



Priprava 2% roztoku: 2 litre vody + 40 ml Orotol® plus
(2x polievčka)



Doba pôsobenia
cez noc,
min. 1 hod.



Minimálne 250 ml roztoku na pluvadlo



Pri opätovnom uvedení do prevádzky odsajte 2 litre vody

Návod týždenné čistenie MD 555 cleaner



Odsajte 2 litre vody




Priprava 5% roztoku: 2 litre vody + 100 ml MD 555 cleaner
(5x polievčka)



Doba pôsobenia
(nie dlhšie)



Minimálne 250 ml roztoku na pluvadlo

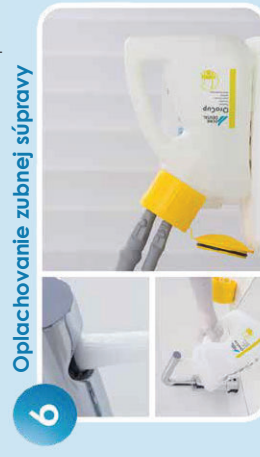

Pri opätovnom uvedení do prevádzky odsajte 2 litre vody